

## Anleitung für das richtige Anlegen der zwissMASK

1. Vor und nach dem Aufsetzen der Maske müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden (20-30 Sekunden mit Seife).
2. Falten Sie die zwissMASK auseinander.
3. Führen Sie die zwissMASK an Ihr Gesicht und legen Sie jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.
4. Überprüfen Sie die Passform an Kinn, Mund und Nase und regulieren Sie die Position der zwissMASK sowie die Größe der Ohrschlaufen gegebenenfalls nach. Die Ohrschlaufen können Sie mithilfe einer Schere ganz leicht vergrößern. Nutzen Sie hierzu die bereits vorgestanzten Markierungen.
5. Die Masken sollten nach dem Abnehmen luftdicht verschlossen oder sofort gewaschen werden.

Variable Ohrschlaufe,  
leichte Anpassung der  
Größe dank vorgestanzter  
Markierungen möglich

